

Century City Spa Table



© Copyright 2018
Living Earth Crafts®

Derechos Reservados. Este manual del usuario, o cualquier parte del mismo, no será reproducido de ninguna manera, ya sea por fotocopia o traducción a otro idioma sin el permiso previo por escrito de Living Earth Crafts.

Living Earth Crafts® es una marca registrada de Earthlite, LLC.

Aviso Legal

La información proporcionada en este manual del usuario es únicamente con fines informativos y está sujeta a cambios sin previo aviso. La información proporcionada en este manual del usuario no debe asumirse como un compromiso de parte de Living Earth Crafts®.

Living Earth Crafts® no asume ninguna responsabilidad en cuanto a la exactitud o la idoneidad de la información contenida en este manual del usuario. Este manual del usuario puede contener inexactitudes o errores técnicos. Living Earth Crafts® no ofrece ninguna garantía expresa o implícita de ningún tipo con respecto a la información contenida en este manual del usuario incluyendo, pero no limitándose a, las garantías implícitas de comerciabilidad para fines específicos.

Living Earth Crafts® no se hace responsable de los daños fortuitos o imprevistos relacionados con, o derivados del producto, del manejo o uso de este manual del usuario, y la información y el material adjuntos.

Especificaciones del Producto

Longitud de la cama	73" (185 cm)
Anchura de la cama	28", 30", 32" (71 cm, 76 cm, 81 cm)
Tamaño de la Base	48" L x 21.25" W (122 cm L x 54 cm W)
Rango de Altura	20.5" - 36" (52 cm - 91 cm)
Capacidad de Elevación	500 lbs

Características del Producto

Característica	Estándar	Opcional
Estructura de Uso Comercial	X	
Totalmente Motorizada	X	
Colchón con capa de Espuma Viscoelástica de 4"	X	
Controles Inalámbricos	X	
Cajón Calentador Digital	X	
Sistema de Cromoterapia LED	X	
4 Areas de Almacenamiento	X	
Colchón con Sistema Strata GT™ SpaMattress y GelTech™		X
Descansa brazos tipo Pivot-Perfect		X
Calentador de Cama Integrado		X
Soporte de Pecho Ajustable		X
Ruedas		X
Pedal de Seis Botones		X

Simbolos de Seguridad

Familiarize yourself with the following Safety & Warning symbols. They are designed to prevent damage and injury to you, your clients, and your new Earthlite product.

IMPORTANTE: Las instrucciones y advertencias sobre seguridad en este manual no cubren necesariamente todos los problemas y condiciones que puedan ocurrir. Use el sentido común y la precaución al instalar, operar o mantener esta unidad.



Indica una situación de peligro inminente que podría provocar lesiones graves o fatales.



Indica una situación potencialmente peligrosa que podría provocar lesiones graves.



Indica una situación potencialmente peligrosa que podría provocar daños y/o lesiones a la unidad.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD - SOLO PARA USO COMERCIAL

Lea todas las instrucciones antes de usar este producto.




RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, INCENDIO Y EXPLOSIÓN

- 1) Siempre desconecte de la toma de corriente eléctrica este aparato antes de realizar el mantenimiento.
- 2) Nunca use este aparato si nota que tiene un cable o enchufe dañado, si no funciona correctamente, si se ha dañado al caerse, o ha tenido contacto con agua. Devuelva el aparato a un centro de servicio para su revisión y reparación.
- 3) Mantenga el cable alejado de superficies calientes.
- 4) No lo use en exteriores.
- 5) No lo use en sitios donde se estén utilizando proyectos de aerosol (spray) o donde se esté administrando oxígeno.
- 6) Para desconectar, ponga todos los controles a la posición de apagado, luego retire el enchufe del tomacorriente.
- 7) Conecte este aparato a un tomacorriente que tenga una conexión a tierra adecuada. Véase las Instrucciones de Conexión a Tierra.

INSTRUCCIONES DE CONEXIÓN A TIERRA:

FUENTE DE ALIMENTACIÓN: (120V CA con polo a tierra) Limitaciones eléctricas: No use un cable de extensión con este producto, enchúfelo directamente a un tomacorriente conectado a tierra. **Este producto debe estar conectado a tierra.** Si falla o se descompone, la conexión a tierra suministra una ruta de menor resistencia a la corriente eléctrica que reduce el riesgo de descarga eléctrica. Este producto suministra un cable que tiene un conductor de conexión a tierra para la unidad y un enchufe de conexión a tierra. Este enchufe trifásico de conexión a tierra solo se conecta en el tomacorriente de una manera. Si el enchufe no se acopla completamente en el tomacorriente, comuníquese con un electricista calificado para instalar el tomacorriente adecuado. No cambie el enchufe de ningún modo.

VERSIÓN PARA AMÉRICA DEL NORTE

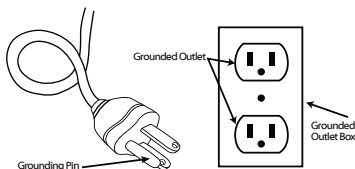

VERSIONES INTERNACIONALES

Este producto es para el uso en un circuito nominal de 220V-240V y tiene un enchufe de conexión a tierra (el tipo de enchufe varía según el país). Asegúrese de que el producto está conectado a una tomacorriente que tenga la misma configuración que el enchufe. No se debe utilizar ningún adaptador con este producto.

LEA Y GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES



Para reducir el riesgo de quemaduras, incendios, descargas eléctricas o lesiones a personas:

- 1) Utilice este aparato solo para el uso previsto como se describe en estas instrucciones. No utilice accesorios que no sean los recomendados por el fabricante.
- 2) No opere este aparato a menos que esté debidamente capacitado.
- 3) Instale este aparato en un área de trabajo sin acceso al público.
- 4) Es necesario contar con supervisión cuando este aparato vaya a ser utilizado por niños, o cerca de ellos, personas inválidas o discapacitadas.
- 5) Este producto no cuenta con protección de "punto de agarre". Sólo opere una vez que se asegure de que ninguna parte del cuerpo pueda ser atrapada y lesionada al mover la camilla hacia arriba/hacia abajo, o al activar la inclinación de la sección para espalda o pies.
- 6) No utilice este aparato para colocar equipo de video tales como televisores o monitores de computadora.
- 7) Nunca trate de usar la sección de elevación de la espalda o las piernas para colocar peso excesivo al sentarse o apoyarse en las orillas de la cama.



- 1) Al bajar cualquier sección de la camilla, asegúrese de que no haya objetos o alguna parte de su cuerpo o el cuerpo de su cliente entre la parte superior de la cama y la base. Esto podría provocar lesiones, dañar su cama y/o el objeto. Se recomienda siempre bajar la sección superior de la cama a la posición plana y bajar la cama para evitar dejar la base expuesta.
- 2) Al bajar la altura de la cama, asegúrese de que no haya objetos extraños debajo de la ella que puedan obstruir que baje completamente. Esto podría dañar su cama.
- 3) Nunca coloque objetos debajo de la estructura de la cama a fin de evitar golpes al bajarla.
- 4) Nunca opere su cama en una superficie irregular. Ajuste los pies de nivelación para que su cama quede estable.
- 5) Nunca eleve la sección de la espalda o piernas cuando el cliente esté en posición tendida boca abajo.
- 6) Nunca use o guarde su camilla en un ambiente húmedo o muy mojado. El agua y la humedad excesiva pueden dañar el armario de madera y los componentes eléctricos. La evidencia de exposición al agua o la humedad anulará su garantía.
- 7) Si ha comprado la Opción de Reposabrazos Flexible, nunca use los Reposabrazos como agarraderas o partes para apoyar el cuerpo, especialmente al ubicar o retirar a los clientes de la camilla.
- 8) Nunca deje caer ni inserte ningún objeto en ninguna abertura.

LEA Y GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Instrucciones Básicas de Configuración

Una vez que su camilla Century City esté en posición de uso, siga estos pasos:

- Enchufe el cable de alimentación en un tomacorriente que tenga la conexión a tierra prevista y adecuada para la cama.
- Organice y sujete el cable de alimentación para evitar el peligro que alguien se tropiece.
- Coloque el control remoto y pedal en lugares donde estén seguros y accesibles.
- Asegúrese de que los controles no estén en riesgo de ser aplastados por los mecanismos de elevación o inclinación.
- Siga las instrucciones de “Nivelación de la Cama” descritas a continuación.






Asegúrese de colocar los cables de alimentación y del pedal para evitar el riesgo a tropezarse y que no estorben el paso de las partes móviles.

Nivelación de la Cama

La nivelación o el balance de la cama es muy importante durante la instalación inicial y el mantenimiento de rutina. La cama está equipada con patas de nivelación que pueden ajustarse en pisos desnivelados.


Para ajustar las patas de nivelación:

1. Coloque la cama en la ubicación que será utilizada.
2. Para saber cuál pata debe ajustarse, intente “balancear” la camilla. Si observa algún movimiento, la pata que permanece suspendida en el aire es la que necesita ajuste.
4. Manualmente, o con una llave de tuercas si es necesario, gire la pata de nivelación en la dirección deseada. (En sentido contrario a las agujas del reloj disminuirá la altura total, en el sentido de las agujas del reloj aumentará la altura total)

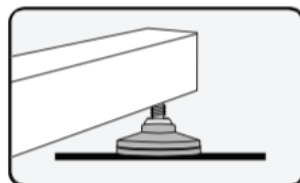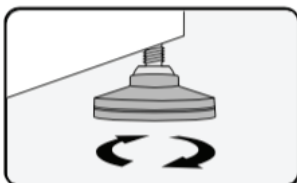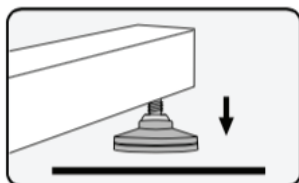

Accesorios de la Cama

Las camas incluyen entrada para la plataforma de la almohada facial en ambos extremos, están específicamente diseñadas para proporcionar una ubicación fija para las plataformas FacePillow, almohadas de salón y otros accesorios.

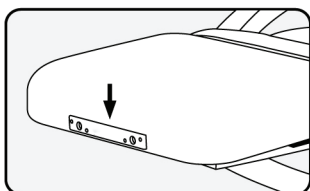

Puede consultar la página web de Living Earth Crafts para ver todos los accesorios disponibles que se pueden acoplar en los tomacorrientes de la cama.

Capacidades de Peso y Elevación

500 lbs.

La cama Century City funciona con 2 columnas de elevación motorizadas muy resistentes. La capacidad de elevación recomendada es de 500 libras.


50 lbs.

Las secciones para la espalda y las piernas tienen una capacidad máxima de peso de 50 libras. Estas secciones no están diseñadas para sostener el peso corporal total.


Notas Importantes de Seguridad



Siempre tenga mucho cuidado al hacer cualquier ajuste en la posición de la cama. Asegúrese de que todas las partes del cuerpo y los objetos estén alejados de las partes que se mueven. Los ajustes que se describen se pueden realizar mientras el cliente está en la cama, pero tenga cuidado y verifique que el peso del cliente esta apoyado correctamente al mover la(s) diferentes sección(es) de la cama.

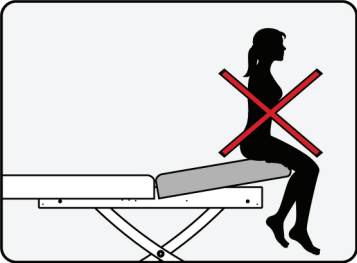

No se sienta ni coloque presión innecesaria en la parte de la cama que levanta la espalda cuando ésta se encuentre inclinada. Esto puede dañar o destruir el mecanismo de inclinación y causar daños o lesiones corporales a las personas. El mecanismo de inclinación está destinado únicamente para ser utilizado cuando un cliente está correctamente sentado o recostado sobre la cama. Los daños causados por este incumplimiento pueden anular la garantía.

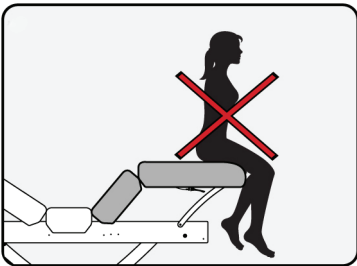

No se sienta ni coloque presión innecesaria en la sección de las piernas cuando esté elevada. Esto puede dañar o destruir el mecanismo de inclinación y causar daños o lesiones corporales a las personas. El mecanismo de inclinación está destinado únicamente para ser utilizado cuando un cliente está correctamente sentado o recostado sobre la cama. Los daños causados por este incumplimiento pueden anular la garantía.



NO guarde ni coloque ningún objeto debajo de la sección de la espalda o en la base: esto puede dañar el equipo y/o el mecanismo de inclinación y anulará la garantía. Esta área no está diseñada para almacenamiento o como un área para guardar el pedal ni accesorios para masaje durante el tratamiento.

Especificaciones Eléctricas

Especificación	Norteamérica	Europe/Asia
Voltaje de Entrada	120 VAC	220 VAC
Frecuencia de Entrada	60 Hz	50 Hz
Consumo	12 Amps, 180 Watts	6.5 Amps, 165 Watts
Salida	32 VDC	32 VDC
Ciclo de Trabajo	10%, 2 min/18 min	10%, 2 min/18 min

Operación de Ruedas (Opcional)

Si su mesa Century City está equipada con ruedas opcionales, lea estas instrucciones en su integridad antes de operar su mesa.



Las ruedas no deben utilizarse mientras que una persona esté colocada sobre la mesa.

Para utilizar las ruedas/mover la mesa:


1. Utilizando el control manual o de pedal, levante la mesa de modo que la parte inferior del gabinete esté por lo menos a 12 pulgadas del piso.
2. Hay dos (2) palancas de pedal negras ubicadas en la parte inferior del gabinete. Una en el extremo de la cabeza y una en el extremo de la base, sobre el lado de la mesa donde está ubicada el cajón calentador.
3. Para habilitar las ruedas, coloque su pie sobre la palanca y presione hacia abajo y gire hacia afuera. Las ruedas saldrán por debajo del gabinete de la mesa.
4. Repita en el otro extremo de la mesa utilizando la otra palanca.
5. Una vez que ambas palancas de pedal se han liberado puede utilizar el control manual o de pedal para bajar la mesa hasta que todas las cuatro (4) ruedas toquen completamente el piso. (Nota: una vez que las ruedas toquen el piso, la base se levantará automáticamente del piso.)
6. Desconecte su mesa y arregle todos los cables y controles de modo que no generen un riesgo de tropiezo o estén en medio de la ruta de cualquier parte móvil.
7. Coloque sus manos sobre cualquiera de los lados de los insertos del apoyacabeza para mover su mesa.

Para guardar las ruedas:

1. Asegúrese de que no haya nada debajo de la base de la mesa.
2. Utilizando el control manual o de pedal, levante la mesa de modo que la parte inferior del gabinete esté por lo menos a 12 pulgadas del piso. La base bajará hasta el piso antes de que la mesa se levante.
3. Coloque su pie sobre la palanca de pedal y gire las ruedas hacia el lado inferior del gabinete. Las ruedas volverán a la posición fija debajo del gabinete.
4. Repita en el otro extremo de la mesa utilizando otra palanca.



Palanca de pedal en posición de "inicio".

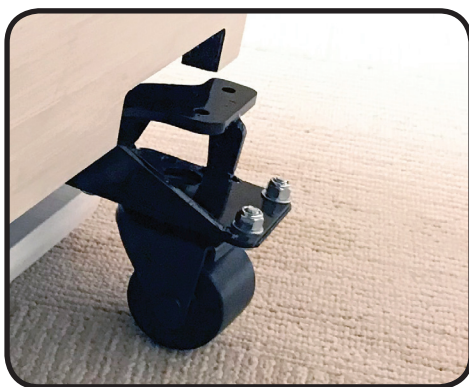

Palanca de pedal completamente liberada.

Limpieza y Mantenimiento Continuos



RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA

Siempre desenchufe este aparato del tomacorriente antes de limpiarlo.



NO USE acetona, limpiadores de superficie “Armor All”, limpiadores a base de cítricos o industriales. Éstos pueden dañar seriamente la tapicería. Tales daños no están cubiertos por la garantía.

Con el mantenimiento adecuado, la cama está diseñada para brindarle años de funcionamiento sin problemas. Para garantizar que la cama siempre funcione de forma apropiada y mantenga su aspecto íntegro, recomendamos lo siguiente.

Categoría	Recomendaciones de Mantenimiento
Tapicería	Elimine la suciedad y las manchas del diario con una solución de agua y jabón suave. Para manchas difíciles y para desinfectar, use una solución de agua y blanqueador (100 a 1). Rocíe un paño húmedo con la solución para limpiar la superficie. Después de cada limpieza, limpie suavemente la tapicería con un paño húmedo y agua limpia, luego deje que la tapicería se seque por completo antes de usarla o guardarla. Para manchas más difíciles, póngase en contacto con el distribuidor o llámenos directamente para recibir orientación. Para obtener mejores resultados, use sólo los productos recomendados anteriormente.
Laminado	Para limpiar la superficie, use un paño húmedo o una esponja y un jabón o detergente suave. Enjuague bien con agua tibia y seque.
Partes Electrónicas	Los rociadores antiestáticos de aerosol para electrónicos se pueden usar para mantener libres de polvo las superficies de los componentes electrónicos, cables de alimentación y enchufes.
Lubricación y Mecánica	El actuador o elevador mecánico no requiere mantenimiento. No lubricar. Tenga cuidado de no aplicar sustancias pegajosas al mecanismo. NO UTILICE jabón y agua para limpiar el mecanismo de elevación
Patas de Nivelación	Verifique regularmente que la camilla esté nivelada y estable. Lea la sección con las instrucciones de nivelación en la sección previa.



Contact Us

Living Earth Crafts
990 Joshua Way
Vista, CA. 92081
(760) 597-2155

info@livingearthcrafts.com

Horas de Trabajo:

Lunes - Viernes
8:00 a.m. to 5 p.m. PST

Sábado-Domingo
Cerrado

Visitenos en: livingearthcrafts.com



Facebook



Twitter



LinkedIn

